


CEROTTO BERTELLI^{med}

TERMOATTIVO

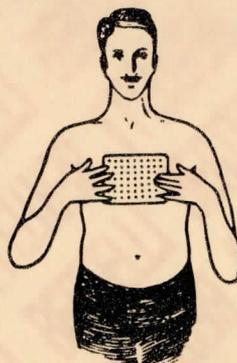

Dona sollievo a:
mal di schiena, stiramenti muscolari,
nevralgie intercostali,
dolori muscolari e articolari

NON MACCHIA, NON UNGE

Cerotto Bertelli Med è un dispositivo medico particolarmente indicato in caso di mal di schiena, stiramenti muscolari, nevralgie intercostali, dolori muscolari e/o articolari dovuti a contratture di varia natura.

Grazie all'effetto termoattivo il Cerotto dona sollievo alla parte interessata. Non unge, non macchia.

COME USARE

CEROTTO BERTELLI MED

Liberato dalla carta siliconata che ne protegge lo strato adesivo, **Cerotto Bertelli Med** si applica sulla cute previamente asciugata facendolo aderire perfettamente con un leggero massaggio.

Si consiglia di sostituirlo preferibilmente ogni 24 ore.

L'asportazione del Cerotto è facilitata utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto di acqua tiepida o olio di oliva.

Quando e per quanto tempo: l'azione di **Cerotto Bertelli Med** si esplica generalmente entro le 24 ore. Tuttavia se l'effetto non è stato raggiunto entro questo periodo di tempo, **Cerotto Bertelli Med** può rimanere applicato più a lungo oppure può essere sostituito con un altro.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Dispositivo Medico per uso Esterno.

FORMATO 16x12,5 cm REF 00070056



Kelémata

Cerotto Bertelli Med è un dispositivo medico particolarmente indicato in caso di mal di schiena, stiramenti muscolari, nevralgie intercostali, dolori muscolari e/o articolari dovuti a contratture di varia natura. Grazie all'effetto termoattivo il Cerotto dona sollievo alla parte interessata. Non unge, non macchia.

AVVERTENZE

Applicare **Cerotto Bertelli Med** esclusivamente su cute integra.

Non usare **Cerotto Bertelli Med** in caso di ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Non usare in età pediatrica, in gravidanza e/o allattamento.

L'uso prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In caso di fenomeni irritativi evidenti o in caso di ipersensibilità al prodotto o ad uno dei suoi componenti sospendere immediatamente il trattamento. Qualora i fastidi persistano in maniera continuativa, consultare il proprio medico.

Chiedete consiglio al vostro medico o farmacista se state usando trattamenti farmacologici, compresi quelli senza prescrizione medica.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

EFFETTI INDESIDERATI

Il rispetto delle istruzioni per l'uso riduce il rischio di effetti indesiderati. L'uso, specie se prolungato, può dare origine a

fenomeni di sensibilizzazione. Comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non indicati sulla confezione.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura inferiore a 30 °C. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata.

COMPOSIZIONE: CAPSICO OLEORESINA, ARNICA ESSENZA, OLIBANO, GOMMA NATURALE, FERRO OSSIDO, COLOFONIA IDROGENATA ED ESTERIFICATA, IRIDE RIZOMA, METILE P-IDROSSIBENZOATO, BHT, OLIO DI VASELINA, 2,2' METILEN-BIS-(4 METIL-6 TERBTULFENOLO).



Kelémata S.r.l. Corso Re Umberto, 20 - 10128 Torino

Data di ultima revisione: REV. 01 Luglio 2020



Cerotto Bertelli Med è un dispositivo medico particolarmente indicato in caso di mal di schiena, stiramenti muscolari, nevralgie intercostali, dolori muscolari e/o articolari dovuti a contratture di varia natura. Grazie all'effetto termoattivo il Cerotto dona sollievo alla parte interessata. Non unge, non macchia.